

# ALLES SPÜLT

## ANLEITUNG ZUM PCR-TEST IN DER SCHULE




### WICHTIG

30 MINUTEN VOR DEM TEST  
NICHT ZÄHNE PUTZEN, TRINKEN,  
ESSEN ODER RAUCHEN.

TESTRÖHRCHEN  
MIT LÖSUNG



TRICHTER

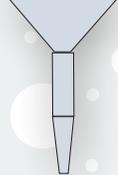


BARCODES



DESINFEKTIONS-  
TÜCHER



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
SCHUTZBEUTEL



**COVID-19 NACHGEWIESEN**  
DIE SCHULE INFORMIERT DIE SCHÜLERIN/  
DEN SCHÜLER, DIE ELTERN/  
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN UND DIE  
ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

**COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN**  
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN  
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

# 1

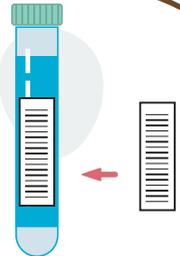

- Löse einen Barcode vom Bogen
- Klebe ihn der Länge nach auf das Röhrrchen (NICHT herumwickeln)

# 2



- Öffne das Teströhrchen
- Leere die Flüssigkeit in den Mund
- Spüle die Flüssigkeit 1 Minute im gesamten Mundraum im Kreis

# 3



- Spucke die Flüssigkeit über den Trichter in das Teströhrchen

# 4



- Verschließe das Teströhrchen mit der Verschlusskappe

# 5




- Desinfiziere das verschlossene Teströhrchen mit dem Desinfektionstuch

# 6



- Gib die Probe in den Schutzbeutel und verschließe ihn gut

# 7

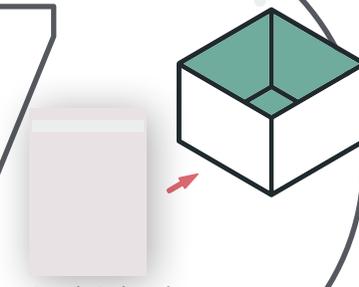

- Lege die Probe in die bereitgestellte Sammelbox